

NIĆ RETRAKCYJNA *BEST-Cord*TM **NANO** TECHNOLOGY

Niść retrakcyjna impregnowana 6-hydratem chlorku glinu. Używana do retrakcji tkanek dziąsłowych wokół zęba dla poprawy rezultatów wycisku oraz hemostazy brzegu dziąsła.

Skład:

Poliester/ Poliamid włókno sprzężone.

Impregnowane 6-hydratem chlorku glinu 0.50 mg ± 0.10 mg/cal.

Zastosowanie:

- Uciąć niść impregnowaną na wymaganą długość używając ostrza umieszczonego w wieczku pudełka.
- Nałożyć ciasno na szyjkę zęba i wcisnąć w bruzdę przy użyciu upychacza.
- Zostawić niść na 5 minut w bruzdzie.
- Usunąć niść bezpośrednio przed wyciskiem.

Zawartość:

- Dozownik zawierający 203 cm (80 cali).

Przechowywanie:

- Zamknąć wieczko po użyciu i przechowywać w suchym miejscu.

Ostrzeżenia:

- Wyłącznie do użycia przez lekarza stomatologa.
- Przechowywać z dala od dzieci.
- Nie używać u pacjentów z alergią na 6-hydrat chlorku glinu.



Data aktualizacji: 22.05.2012/2



PPH CERKAMED, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

tel. /fax: +48 15 842 35 85, www.cerkamed.pl, e-mail: biuro@cerkamed.pl