

Tekutina na rozšiřování kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: Kyselina ethylendiamintetraoctová, Disodná sůl (EDTA 17%), voda s lékopisně čistotou, pomocné látky.

URČENÍ

ENDO-SOLUTION se používá na mechanické zpracování kořenových kanálů. Přípravek podporuje propichování a očišťování, odstraňuje smear layer vrstvu, odhalujíc otvory zubinových kanálů.

Kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) obsažená v přípravku vypláchnoucí vápenaté a hořčíkové ionty způsobuje rozměkčování vrchní vrstvy zuboviny, aby usnadnit její odstranění a propíchnutí kanálu.

Adaptér se šroubovacím uzávěrem na odebrání přípravku na stříkačku

1. Odšroubujte šroubovací uzávěr láhve.

2. Utáhněte adaptér na láhvi.

3. K použití odstraňte modrý šroubovací uzávěr, umístěte koncovku stříkačky v otvoru adaptéru, skloňte láhev s přípravkem dnem vzhůru a odberte tekutinu do stříkačky, současně držte adaptér. Poté nastavte láhev na pultu ve vertikální poloze a jemně vyšroubujte stříkačku s tekutinou z adaptéru. Doporučuje se používání stříkaček luer-lock s gumovou pístů.

4. Po každém použití zabezpečte adaptér modrým šroubovacím uzávěrem.

5. Na přepravu odstraňte adaptér a přišroubujte láhev uzávěrem. ZPŮSOB POUŽITÍ

Aby propíchnout kořenový kanál, je třeba zavést do kanálu 2-3 kapky tekutiny ENDO-SOLUTION a současně mechanicky zpracovávat kanál po dobu cca. 30 sek. Vypláchněte fyziologickou solí. Činnost opakujte několikrát. Doporučuje se vypláchnout chlornanem sodným (CHLORAXID).

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku. Nezanedbávejte přípravek v kanálu ani zubní dutině mezi návštěva. Toto může způsobit nadměrné změkčování zuboviny.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Zvláštní opatrnost během používání při perforaci. Může mít dráždivý účinek na kůži a oči. V případě zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poradte se s lékařem.

Při požití nenuťte zvracení. Vypít velké množství vody. Poradte se s lékařem. Během práce s výrobkem používejte kofferdam.

Během práce s výrobkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

DÁVKOVAČ NESLOUŽÍ PRO SKLADOVÁNÍ TEKUTINY!

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu za teploty nižší 25 ° C. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je na přímém obalu.

Po otevření balení doba použitelnosti se nemění a podmínky těsného uzavírání po každém použití.

LIKVIDACE OBALŮ Z VÝROBKU

Opotřebované balení odevzdejte na likvidaci nebo vraťte k výrobci.

BALENÍ

Láhev obsahuje 50 ml nebo 120 ml nebo 200 ml přípravku, adaptér se šroubovacím uzávěrem, dávkovač.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85