


**GOLDEN**  
v e r s i o n

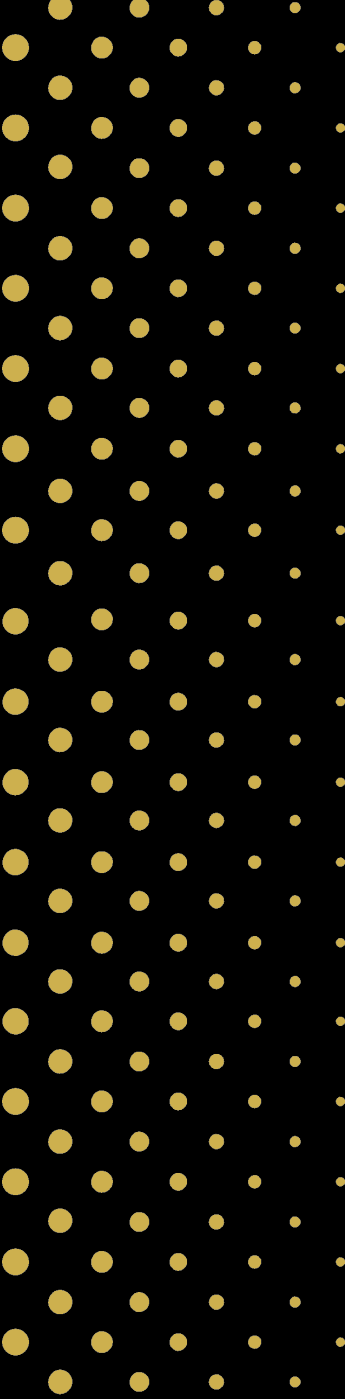

**ENDO**  **aspirator** **PRO**®

PL


# ENDO aspirator

PRO<sup>®</sup>


EN

do odsysania płynów z kanału korzeniowego/  
for removal of liquids from root canals

1. Rękojeść/ Handle
2. Aplikator elastyczny/ Elastic applicator
3. Wąż z gwintem luer lock/ Luer Lock hose
4. Łącznik/ Connector
5. Magnes/ Magnet
6. Czyścik/ Ramrod for cleaning

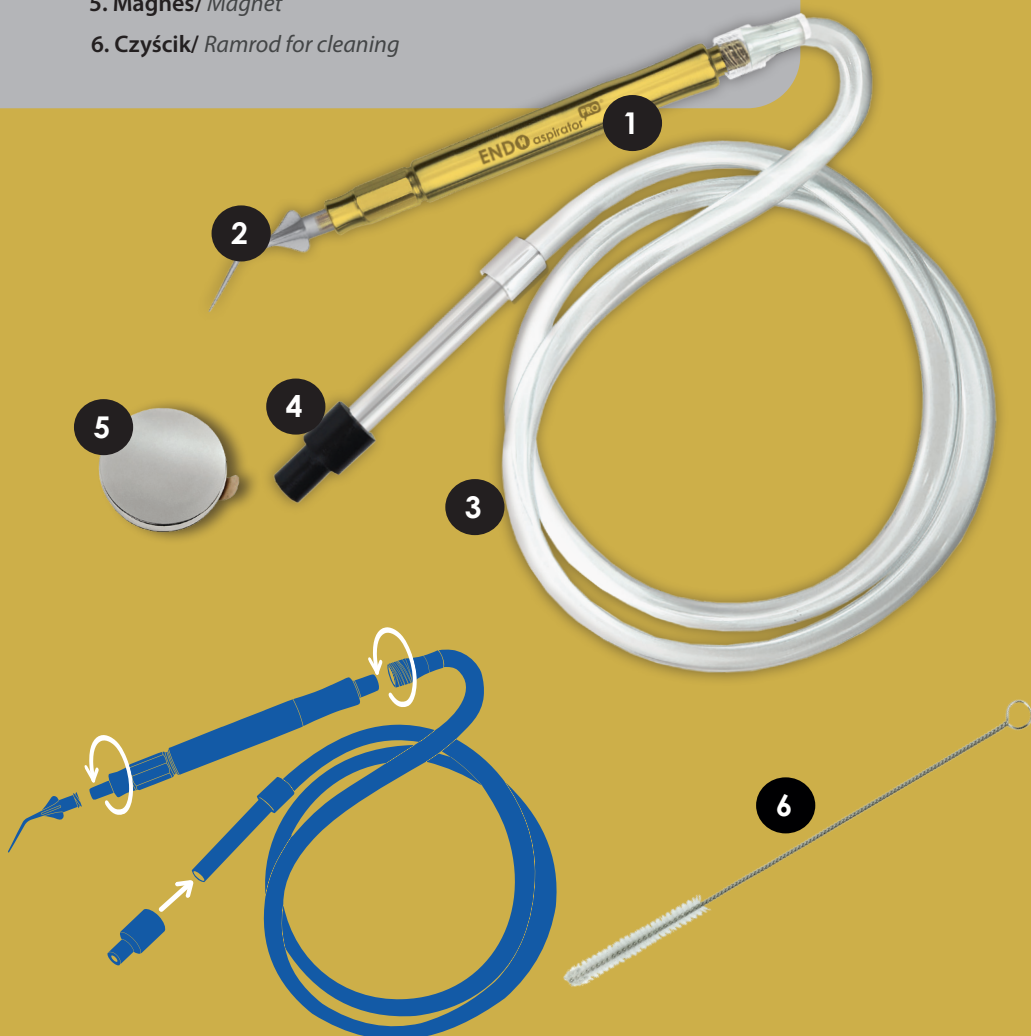


# Instrukcja mocowania narzędzia. Tool attachment instructions.

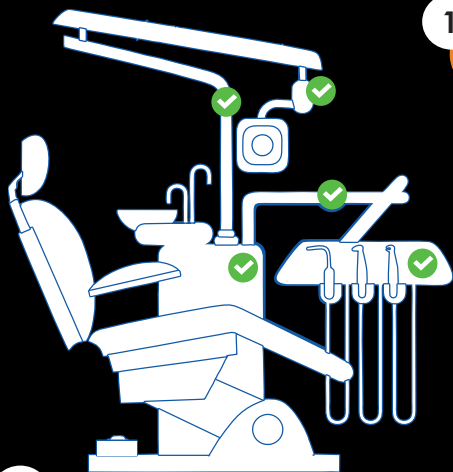

1

Wybierz dowolną, płaską powierzchnię mocowania Endo-Aspiratora PRO przy unie lub mikroskopie.

*Choose any flat surface to mount the Endo-Aspirator PRO on a unit or a microscope.*

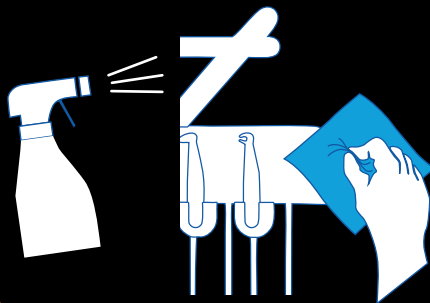

2

Oczyść miejsce mocowania narzędzia używając dowolnego środka do odtłuszczenia.

*Clean the tool attachment area with any degreasing agent.*



3


Usuń warstwę zabezpieczającą naklejkę magnesu.

*Remove the protective layer from the magnet sticker.*

4

Przyłóż warstwę klejącą magnesu do wybranego miejsca, a następnie dociśnij magnes.

*Apply the adhesive magnet layer to the desired place and press down the magnet.*

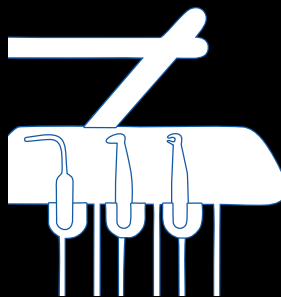

5

Przyłóż rękojeść Endo-Aspiratora PRO do magnesu.

*Place the Endo-Aspirator PRO handle to the magnet.*





**CERKAMED**, ul. Kwiatkowskiego 1  
37-450 Stalowa Wola, Poland  
tel./fax: +48 15 842 35 85  
e-mail: [biuro@cerkamed.pl](mailto:biuro@cerkamed.pl)  
[www.cerkamed.com](http://www.cerkamed.com)

